



# Clarity

Эстетичные решения для Вашей практики

## Самолигирующие керамические брекететы Clarity™ Ultra

### Часто задаваемые вопросы

#### Позиционирование и фиксация

##### 1. Самолигирующие брекететы

**Clarity™ Ultra** поставляются с открытой или закрытой дверцей?

Брекететы Clarity™ Ultra поставляются с открытой дверцей с целью исключения дополнительного этапа открытия дверцы для установки дуги, тем самым повышая вашу производительность.



##### 2. Как следует устанавливать брекететы Clarity™ Ultra?

Брекететы Clarity™ Ultra имеют вертикальные и горизонтальные разметочные линии, служащие для точного позиционирования брекета. При окклюзионно-гингивальном захвате брекета может происходить закрытие дверцы. Для снижения нагрузки на концентратор напряжения, удерживайте брекеты мезио-дистально в области фланца основания.

##### 3. Какой инструмент рекомендован для захвата брекета?

Захват и установку брекета рекомендуется проводить пинцетом обратного действия (номер по каталогу 804-171), т.к. он оказывает небольшую последовательную силу.

##### 4. Как я могу удалить цветовую разметку с поверхности брекета?

Цветные идентификационные метки обеспечивают вертикальную и горизонтальную визуализацию для определения оптимальной позиции брекета. Цветные идентификационные точки используются на большинстве брекетов. Эти метки и точки на брекетах Clarity™ Ultra водорастворимы. Их следует удалить после фиксации брекет-системы, но перед установкой дуги.

##### 5. Имеются ли какие-нибудь советы и рекомендации для визуализации окклюзионного края брекета во время его позиционирования на верхнем зубном ряду с открытой дверцей?

На верхнем зубном ряду используйте окклюзионный край открытой дверцы для выравнивания брекета по отношению к режущему краю зуба.

#### Фиксация

##### 1. Как я могу избежать скопления адгезива под основанием брекета?

При фиксации брекетов без преднанесенного адгезива APC Flash-Free необходимо очень тщательно удалять излишки вокруг основания брекета, чтобы снизить риск блокировки дверцы и окрашивания излишков адгезива в процессе лечения.

##### 2. Можно ли дополнительно лигировать брекететы Clarity™ Ultra?

Да, вы можете дополнительно лигировать брекететы Clarity™ Ultra, используя эластическую лигатуру или цепочку и/или металлическую лигатуру, при необходимости.

##### 3. Могу ли я использовать эластики по II классу на брекетах Clarity™ Ultra?

Да. Все брекеты, предназначенные для клыков и премоляров, имеют дистальный крючок, являющийся дополнительным элементом для фиксации.

##### 4. Могу ли я использовать стопоры для дуги на брекетах Clarity™ Ultra?

Вы можете использовать стопоры и/или дугу с центральным изгибом на брекет-системе Clarity™ Ultra.

#### Открытие/закрывание дверцы

##### 1. Необходим ли мне специальный инструмент для открывания/закрывания брекетов?


Рекомендовано использование инструмента для открытия и закрытия брекетов Clarity™ Ultra (номер по каталогу 804-155).

Открывание брекета осуществляется без чрезмерного давления. А для закрывания используйте часть инструмента, помогающую полностью ввести дугу в паз брекета.



##### 2. Как правильно закрывать дверцу брекета Clarity™ Ultra, используя инструмент?

- 1) Используйте часть инструмента, помогающую полностью ввести дугу в паз брекета.
- 2) Убедитесь, что дуга полностью прижата к основанию паза при легком нажатии инструментом на нее.
- 3) Сожмите инструмент.
- 4) Вы услышите щелчок, когда дверца брекета закроется.

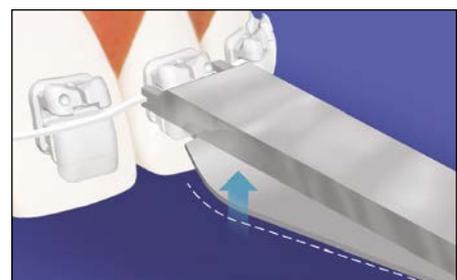

##### 3. Какую тактику я могу использовать при закрывании дверцы брекетов Clarity™ Ultra при выраженной скученности зубов?

При закрывании брекета, поместите дугу сначала в брекеты зубов с самым неправильным положением. Затем перейдите к остальным зубам. При необходимости помогайте прижимать дугу пальцами другой руки. Убедитесь, что дуга полностью введена в паз брекета перед закрыванием дверцы.

#### 4. Как закрыть дверцу брекета, используя инструмент для открытия и закрытия, если зубы сильно роторованы?

Вы можете закрыть дверцу брекета пальцами.

#### 5. В каком направлении открывается дверца брекета?


Брекеты Clarity™ Ultra на верхней челюсти открываются в окклюзионном направлении, а на нижней челюсти – в гингивальном направлении.

#### 6. Как я могу убедиться, что дверца брекета закрыта полностью?

Брекет обладает звуковой и тактильной особенностями, и при закрытии или открытии дверцы брекета вы можете слышать характерный щелчок.

#### 7. Как я могу открыть замок-дверцу Clarity™ Ultra?

Чтобы открыть дверцу брекета, поместите инструмент для открытия и закрытия брекетов Clarity™ Ultra (номер по каталогу 804-155) в горизонтальное углубление, находящееся непосредственно над дверцей брекета и поверните инструмент на 90 градусов в любую сторону. Дверца брекета открывается вниз на обоих зубных рядах. Вы услышите характерный щелчок при открывании дверцы.

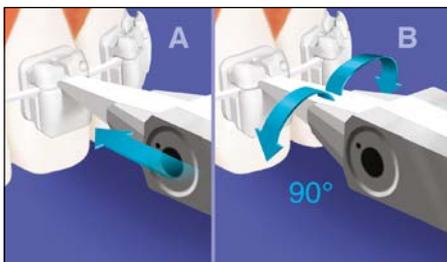

## Снятие

#### 1. Какой инструмент для снятия брекетов мне следует использовать?

Для аккуратного и легкого снятия брекетов рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия брекетов Clarity™ Ultra (номер по каталогу 804-175).



#### 2. Как следует производить снятие брекетов Clarity™ Ultra?

Каждый брекет Clarity™ Ultra имеет концентратор напряжения для снятия его методом сжатия. Брекеты Clarity™ Ultra снимаются после удаления лигатур и дуги. Установите инструмент для снятия брекетов так, чтобы логотип 3M на инструменте был обращен вверх. Установите центральную пластину инструмента в вертикальный паз брекета. Аккуратно сожмите брекет инструментом, а затем наклоните его в мезио-дистальном направлении. Снимите брекет с поверхности зуба, удерживая его части в щечках инструмента.



#### 3. Могут ли брекеты Clarity™ Ultra сниматься вместе с дугой?

Нет, невозможно использовать инструмент для снятия брекетов Clarity™ Ultra с введенной дугой.

## Общий обзор

#### 1. Как брекеты Clarity™ Ultra защищены от окклюзионной интерференции?

Брекеты имеют скошенную окклюзионную поверхность, что позволяет минимизировать окклюзионную интерференцию. Дизайн брекетов дает возможность использовать лигатуры с защитным ограничителем. При необходимости можно изготовить разобщающие накусочные накладочки.

#### 2. С какими брекетами можно комбинировать брекеты Clarity™ Ultra?

Брекеты Clarity™ Ultra можно комбинировать с лигатурными керамическими брекетами Clarity Advanced и низкопрофильными металлическими лигатурными брекетами Victory Series Low Profile. В дополнение к брекетам вы можете использовать щечные трубки с преднанесенным адгезивом Victory Series Superior Fit.

# 3M

Уполномоченный представитель  
на территории РФ АО «3М Россия»:  
108811, г. Москва, п. Московский,  
Киевское ш, 22-й км, домовл. 6, стр. 1  
Офисный центр Comcity

Тел.: +7 (495) 784 7474  
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)  
Факс: +7 (495) 784 7475  
www.3MRussia.ru

Товар зарегистрирован на территории РФ.  
Имеются противопоказания, ознакомьтесь  
с инструкцией. Для распространения на мероприятиях  
для медицинских работников.