

# Ежедневно Orotol® Plus. Ежедневно MD 555.

После каждого применения: аспирировать 1 стакан воды. Перед каждым очищением аспирировать 2 литра воды

## Ежедневно Orotol® Plus (2%)

Применение после окончания рабочей смены, при большой загрузке 2 х в день



**1. Перед очищением аспирировать 2 литра воды.**

**2. Приготовление двух литров 2-%ного раствора Orotol® Plus**

Заполнить OгоCup холодной водой до отметки 2 литра.

Залить 2 дозирочных колпачка Orotol® Plus

(пожалуйста, соблюдайте маркировку).



**3. Перемешать встряхиванием в OгоCup**

**4. Используя OгоCups произвести аспирацию раствора и оставить его на ночь для воздействия.**

**5. Оставшимся раствором (1 литр в OгоCup) продезинфицировать плевательницу.**



**6. На следующее утро произвести аспирацию 2 литров воды.**



## Еженедельно специальное чистящее средство MD 555 (5%)

Применение 1 х в неделю, при большой загрузке ежедневно перед обеденным перерывом

**1. Перед очищением аспирировать 2 литра воды.**

**2. Приготовление 2 литров 5-%ного раствора MD 555.**

Заполнить OгоCup холодной водой до отметки 2 литра.

Залить 5 дозирочных колпачков MD 555 или 1 флакон-образец

(пожалуйста, соблюдайте маркировку).

**3. Перемешать встряхиванием в OгоCup**

**4. Используя OгоCups произвести аспирацию раствора и оставить на время обеденного перерыва для воздействия.**

**5. Оставшимся раствором (1 литр) продезинфицировать плевательницу.**

**6. После обеденного перерыва произвести аспирацию 2 литров воды**



**Указание для техника по сервису:**

**Пожалуйста, вручите этот план пользователю,  
либо расположите его рядом с аспирационной установкой на  
хорошо видимом месте.**